


Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/folia-ochronna-na-tatuaz-second-skin-10-m-x-15-cm-p-3948.html>

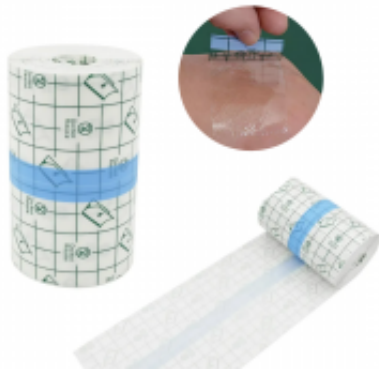

Folia ochronna na tatuaż second skin 10 m x 15 cm

Cena	65,99 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5904624740050
Producent	PRIMA DERMA

Opis produktu

Folia ochronna na tatuaż second skin 10 m x 15 cm Prima Derma

☐ Folia ochronna na tatuaż second skin służy do ochrony świeżo zrobionych tatuaży.

- Zapewnia odpowiednie środowisko w trakcie gojenia, **chroni nowy tatuaż** przed zagrożeniami zakaźnymi z zewnątrz, zanieczyszczeniami oraz ogranicza tarcie od ubrań.
- Jest bardzo **wygodna w użyciu**, naklejona na skórę jest praktycznie niewyczuwalna, elastyczna i rozciągliwa co wpływa na **komfort noszenia**. Pozwala to na umieszczenie jej w dowolnym miejscu na ciele i pozostawienie na kilka dni.
- Ultra cienka folia ochronna second skin zachowuje się jak **druga skóra** na świeżo wykonanym tatuażu.

☐ Sposób użycia:

- Oczyszczyć dłonie ciepłą wodą z mydłem i wytrzeć czystym ręcznikiem.
- Osuszyć skórę ręcznikiem papierowym.
- Zdezynfekuj świeży tatuaż specjalnym preparatem na tatuaże.
- Odetnij z rolki odpowiednio duży format tak aby zakrył cały tatuaż (folia powinna mieć około 3cm marginesu poza tatuażem).
- Zerwij dolny papier ochronny ,znajdujący się u spodu strony zadrukowanej.
- Naklej folię na wytatuowaną **NIE**naciągniętą skórę.
- Zdejmij zadrukowaną wierzchnią folię zabezpieczającą i dociśnij lekko cały opatrunek do skóry.
- Po upływie 2-5 dni należy powoli i pod bieżącą, chłodną, wodą usunąć folię.
- Plaster należy zdejmować pod delikatnym strumieniem letniej wody.
- Po jej usunięciu należy przemyć delikatnie tatuaż z resztek kleju i nałożyć odpowiedni krem.
- Jeżeli tatuaż będzie się silnie sącył należy przerwać stosowanie.

→Wymiary: 10 m x 15 cm