

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/hydra-pen-h3-bezprzewodowy-z-automatycznym-aplikatorem-p-4000.html>



Hydra Pen H3 bezprzewodowy z automatycznym aplikatorem

Cena	680,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5904624749008

Opis produktu

Hydra Pen H3 bezprzewodowy z automatycznym aplikatorem

HydraPen to urządzenie stosowane w salonach estetycznych z przeznaczeniem wykonywania mikronakłuć na skórze.

→ Jest to rodzaj urządzenia do **mezoterapii mikroigłowej**, która polega na delikatnym nakłuwaniu skóry za pomocą drobnych igieł, aby **stymulować naturalne procesy regeneracyjne skóry**.

✓ Kartridże kompatybilne z HydraPen posiadają **fiolkę**, którą napełniamy preparatem jaki chcemy wykorzystać do wykonania zabiegu mezoterapii (np. koktajl, serum itp.)

→ Dzięki niej praca jest szybsza i zapewnia ampułce **precyzyjne** kierowanie w głąb skóry.

✓ Ze względu na inne wykonanie kartridży, HydraPen pracuje **od 1800 obr./min. do 7000 obr./min** po to, aby zawartość fiołki wnikała dokładniej w każdą partię skóry.

→ ZALETY:

- Posiada baterię **700mAh**, pozwalającą na pracę bezprzewodowo.
- Najnowszy model o dopracowanej konstrukcji i innowacyjnymi kartridżami.
- **Certyfikowany** (dokładnie przebadany, uzyskał certyfikat CE i dopuszczenie medyczne).
- Regulacja igły **od 0,25 do 1,0 mm** (obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara spowoduje, że igła będzie dłuższa).
- Wykonany z metalu.
- Gwarantuje najwyższą absorpcję składników aktywnych.
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja.
- Aż **6 poziomów** regulacji prędkości.
- Maksymalna ilość nakłuć to aż **7000/min**.
- **Wyświetlacz** poziomów prędkości.

-
- Frakcja - minimalizuje dyskomfort zabiegu oraz zapewnia większe bezpieczeństwo zabiegu z uwagi na tworzenie mikrokanalików w skórze.
 - Ładowarka **5V**, z wtyczką europejską.

→Skóra twarzy, szyi i dekoltu

- usuwa blizny (np. potrądzikowe),
- spłyca zmarszczki i zwiększa produkcję komórek skóry (Langerhansa, fibroblastów, kolagen, elastyna)
 - pomaga w leczeniu trądziku pospolitego,
 - zmniejsza pory skóry, złuszcza naskórek,
- pomaga w remodelingu (poprawa rysów twarzy),
- ujednolica koloryt, pomaga w rozjaśnianiu zmian pigmentacyjnych,
 - zwiększa absorpcję kosmetyków,
- pomaga w regeneracji i nawilżeniu skóry,
 - poprawia elastyczność.

→Dłonie

- usuwa blizny,
- spłyca zmarszczki i zwiększa produkcję komórek skóry (Langerhansa, fibroblastów, kolagen, elastyna),
- ujednolica koloryt, pomaga w rozjaśnianiu zmian pigmentacyjnych,
 - zwiększa absorpcję kosmetyków,
- pomaga w regeneracji i nawilżeniu skóry,
 - poprawia elastyczność.

→Uda, pośladki i brzuch

- pomaga w redukcji cellulitu oraz zgrubień podskórnych,
 - zwiększa mikrocyrkulację,
- pomaga w niwelowaniu rozstępów i blizn,
 - modelowanie sylwetki.

→Skóra głowy

- profilaktyka w wypadaniu włosów (przyspieszenie fazy anagenu),
 - poprawia mikrokrążenia,
 - regulacja wydzielania sebum,
 - wzmacnia strukturę włosa.

✓W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy **połączenie zabiegu wraz z odpowiednio dobraną ampułką** do mezoterapii mikroigłowej.

□PROCEDURA ZABIEGOWA:

1. Wybierz odpowiedni rozmiar kartridża.

-
2. Znieczul miejsce zabiegowe jeżeli jest taka konieczność.
 3. Kartridż otwórz na chwilę przed zabiegiem.
 4. Zdezynfekuj miejsce poddawane zabiegowi (np. AHD1000).
 5. Zwilż skórę tonikiem lub od razu nałóż ampułkę z przeznaczeniem do mezoterapii mikroigłowej.
 6. Miejsce zabiegowe opracowujemy góra-dół , prawo-lewo i to samo tylko na skos jak na zdjęciu.
- Czynność powtórzyć 4-5 krotnie (każdy obszar osobno).
7. Nałóż wcześniej wybraną ampułkę.

☐☐Dobierając kosmetyki po zabiegu pamiętaj o tym, że skóra została perforowana, więc jest traktowana jako rana. Używaj np. żelu aloesowego, BetaSerum lub maski w płacie marki FASCY☐☐

Zestaw zawiera:

- 1x Hydra Pen H3
- 1x ładowarka
- 1x kabel (USB typ - C)
- 2x kartridże 12 igłowe
- 2x ringi do kartridży
- Instrukcja