

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/kartridz-do-hydra-pen-h3-12-iglowy-p-4046.html>



Kartridż do Hydra Pen H3 12- igłowy

Cena	9,99 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5904624743341

Opis produktu

Oryginalny Kartridż do Hydra Pen H3 12- igłowy Prima Derma

□ Są to **sterylne, jednorazowe**, pakowane pojedynczo kartridże, zaprojektowane specjalnie do urządzenia **Hydra Pen H3**. Przeznaczone są do wykonywania **mezoterapii mikroigłowej**, czyli mikronakłuwania skóry.

→ Kartridże do **hydropena** w porównaniu do **dermapena** posiadają **zasobnik na aplikowany preparat**. Mają pojemność **3ml** ze skalą pomiarową 0-1-2-3ml oraz 3 stopniową **regulację ilości aplikowanego płynu**.

□ Korzyści z użytkowania:

- pełne bezpieczeństwo użytkowania gwarantowane przez jednorazowość produktu,
- efektywność i wygoda stosowania poprzez możliwość regulacji prędkości pracy,
- bezpośrednie dostarczanie składników aktywnych do głębokich warstw skóry za pomocą mikro-nakłuć,
- oszczędność tkanek dzięki powierzchniowej metodzie aplikacji, która nie uszkadza naczyń krwionośnych,
- stymulacja wytwarzania kolagenu i elastyny, co przekłada się na zwiększenie elastyczności skóry,
- aktywacja fibroblastów do produkcji kwasu hialuronowego, co wspomaga nawilżenie, opóźnia starzenie się skóry i przyczynia się do zmniejszenia zmarszczek.

→ **Kartridż 12 igłowy** zależnie od zastosowanego wysuwu :

- 0.25 mm, przeznaczony jest do zabiegów na strefach: skóra głowy (zabiegi zatrzymujące wypadanie włosów), nos, okolice oczu, wargi, szyja (zabiegi napinające skórę, przeciwzmarszczkowe)
- 0.5 mm, średnia intensywność zabiegowa czoło, policzki, kości policzkowe, podbródek, dekolte, szyja (zabiegi napinające, ujędrniające, przeciwzmarszczkowe)
- 1.0 mm, zabiegi o wyższej intensywności zmniejszające blizny (w tym blizny po trądzikowe) i rozstępy na twarzy i ciele.

□ Specyfikacja:

- Typ kartridża: **12 igłowy**.
 - Pojemność: **3ml**.
 - Długość igieł: **1 mm**.
- **Certyfikowany** (dokładnie przebadany, uzyskał certyfikat CE i dopuszczenie medyczne).
 - **Sterylny** (sterylizowany gazem EO, hermetycznie zamknięty).
 - Materiał wykonania: tworzywo sztuczne i **stal chirurgiczna**.
 - **Jednorazowy**.
 - Ilość wkładów: **1 sztuka**.

→ Rodzaje kartridży dedykowane do urządzenia Hydra Pen H3 z automatycznym aplikatorem:

- **12-igłowy** - stosuje się m.in. do niwelowania blizn, rozstępów i małych zmarszczek oraz usuwania trądziku
- **Nano-HR (round nano)** - stosuje się głównie do wtłaczania substancji aktywnych w skórę, do odżywiania skóry oraz zabiegów BB Glow / Glam
- **Nano-HS (square nano)** - stosuje się głównie punktowo do mniejszych obszarów do wtłaczania substancji aktywnych w skórę, do odżywiania skóry oraz zabiegów BB Glow / Glam

Przed użyciem zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą w celu odpowiedniego dostosowania parametrów i technik do indywidualnych potrzeb skóry. Zabiegi z wykorzystaniem długości igieł 0.75mm i powyżej, należy wykonywać tylko przez lekarzy i odpowiednio przeszkolonych profesjonalistów

Przed użyciem **upewnij się**, że wkład jest **sterylnie zapakowany** i opakowanie nie zostało uszkodzone.

Zasobnik na preparat należy napełnić **bezpośrednio** przed zabiegiem. Niezużyty płyn z zasobnika **nie nadaje** się do ponownego użycia

Kartridże nadają się wyłącznie do **jednorazowego użytku**. Po zastosowaniu należy wyrzucić zużyty wkład.