

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/kartridz-modul-24-igiel-dr-pen-a6-m5-m7-mym-zestaw-10-szt-p-3639.html>



## Kartridż / Moduł 24 igieł Dr Pen A6, M5, M7, MYM ZESTAW 10 szt

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cena       | <b>73,00 zł</b>      |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>      |
| Kod EAN    | <b>5904624744973</b> |
| Producent  | <b>PRIMA DERMA</b>   |

### Opis produktu

#### CERTYFIKOWANE

## KARTRIDŻE do urządzeń DERMAPEN 24 igły 10 szt. Prima Derma

☐ Kartridż do mezoterapii mikroigłowej kompatybilny z modelem przewodowym i bezprzewodowym:

- Dr Pen A6
- Dr Pen N2
- Dr Pen M5
- Dr Pen M7
- Dr Pen MyM

→ **Mezoterapia mikroigłowa** poprawia **jędrność i elastyczność** skóry. Zapewnia efekt **odmładzający**. Pobudza skórę do produkcji kolagenu, dzięki czemu **niweluje zmarszczki**. Poprzez perforację, naskórek wchłania większą ilość składników aktywnych znajdujących się w aplikowanych kosmetykach.

#### ☑ ZALETY:

- certyfikowany (dokładnie przebadany, uzyskał certyfikat CE i dopuszczenie medyczne),
  - sterylny (sterylizowany gazem EO, hermetycznie zamknięty),
    - apirogeny,
    - jednorazowy,
  - wkręcany, co gwarantuje większe bezpieczeństwo,
    - regulowane igły od 0,25 do 2.5mm,
    - igły ze stali nierdzewnej,
- kartridż jest połączony 3 łącznikami, co minimalizuje ryzyko odłączenia kartridża od urządzenia,
- frakcja minimalizuje dyskomfort zabiegu oraz zapewnia większe bezpieczeństwo zabiegu z uwagi na tworzenie mikrokanalików w skórze.

→ Zabiegi frakcyjnego mikronakłuwania skóry wykorzystują **czynnik fizyczny**, a więc samo ukłucie, jako sygnał naprawczy oraz **czynnik farmakologiczny**- podanie odpowiednio dobranej ampułki w zależności od problemu.

✓ Na innych aukcjach dostępne inne rodzaje:

- 
- **Kartridż 9-igłowy i 12-igłowy** służy do usuwania blizn na ciele, blizn potrądzikowych, stymulacji sebum, likwidacji rozstępów, odżywienia skóry oraz redukcji zmarszczek; idealny do skóry głowy.
  - **Kartridż 24-igłowy** służy do redukcji zmarszczek i przebarwień, wybielania (meso BB Glow/Glam i inne ampułki), nawadniania, odżywiania, odmładzania skóry; również nadaje się do skóry głowy.
  - **Kartridż 36-igłowy** służy do redukcji zmarszczek i przebarwień, wybielania (meso BB Glow/Glam i inne ampułki), nawadniania, odżywiania, odmładzania skóry; również nadaje się do skóry głowy.
  - **Kartridż 42-igłowy** usuwanie plam pigmentacyjnych i przebarwień, naprawa struktury skóry po trądziku czy ospie wietrznej, zabiegi anti-ageing, obkurczanie porów skóry, stymulacja kolagenu.
  - **Kartridż Nano** służy do usuwania zaczerwienień i odżywiania skóry, wybielania skóry (Meso BB Glow/Glam i inne ampułki), BB Lips (nawilżenia skóry), idealny do nanobrazji-import bezbolesnego odżywiania skóry.

### ☒PROCEDURA ZABIEGOWA:

1. Wybierz odpowiedni rozmiar kartridża.
2. Znieczul miejsce zabiegowe jeżeli jest taka konieczność.
3. Kartridż otwórz na chwilę przed zabiegiem.
4. Zdezynfekuj miejsce poddawane zabiegowi (np. AHD1000).
5. Zwilż skórę tonikiem lub od razu nałóż ampułkę z przeznaczeniem do mezoterapii mikroigłowej.
6. Miejsce zabiegowe opracowujemy góra-dół , prawo-lewo i to samo tylko na skos.  
Czynność powtórz 4-5 krotnie (każdy obszar osobno).
7. Nałóż wcześniej wybraną ampułkę.

☐☐**Dobierając kosmetyki po zabiegu pamiętaj o tym, że skóra została perforowana, więc jest traktowana jako rana. Używaj np. żelu aloesowego, BetaSerum lub maski w płacie**

### ➔Zestaw zawiera:

- 10x Kartridż 24 igły