

Link do produktu: <https://www.primaderma.pl/kartridzmodul-16-igiel-dr-pen-m8-w-m8-c-p-3758.html>



Kartridż/Moduł 16 igieł Dr. Pen M8-W M8-C

Cena	8,90 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5904624746816

Opis produktu

CERTYFIKOWANY

KARTRIDŻ do urządzenia DR. PEN M8-W i M8-C 16 igieł 1 szt. Prima Derma

☐ Kartridż do mezoterapii mikroigłowej kompatybilny z modelem:

- Dr Pen M8-W
- Dr Pen M8-C

→ **Mezoterapia mikroigłowa** poprawia **jędrność i elastyczność** skóry. Zapewnia efekt **odmładzający**. Pobudza skórę do produkcji kolagenu, dzięki czemu **niweluje zmarszczki**. Poprzez perforację, naskórek wchłania większą ilość składników aktywnych znajdujących się w aplikowanych kosmetykach.

☑ ZALETY:

- certyfikowany (dokładnie przebadany, uzyskał certyfikat CE i dopuszczenie medyczne),
 - sterylny (sterylizowany gazem EO, hermeticznie zamknięty),
 - apirogenny,
 - jednorazowy,
 - wkręcany, co gwarantuje większe bezpieczeństwo,
 - igły ze stali nierdzewnej,
- kartridż jest połączony 3 łącznikami, co minimalizuje ryzyko odłączenia kartridża od urządzenia,
- frakcja minimalizuje dyskomfort zabiegu oraz zapewnia większe bezpieczeństwo zabiegu z uwagi na tworzenie mikrokanalików w skórze.

→ Zabiegi frakcyjnego mikronakłuwania skóry wykorzystują **czynnik fizyczny**, a więc samo ukłucie, jako sygnał naprawczy oraz **czynnik farmakologiczny**- podanie odpowiednio dobranej ampułki w zależności od problemu.

☑ PROCEDURA ZABIEGOWA:

1. Wybierz odpowiedni rozmiar kartridża.

-
2. Znieczul miejsce zabiegowe jeżeli jest taka konieczność.
 3. Kartridż otwórz na chwilę przed zabiegiem.
 4. Zdezynfekuj miejsce poddawane zabiegowi (np. AHD1000).
 5. Zwilż skórę tonikiem lub od razu nałóż ampułkę z przeznaczeniem do mezoterapii mikroigłowej.
 6. Miejsce zabiegowe opracowujemy góra-dół , prawo-lewo i to samo tylko na skos.
Czynność powtórzyć 4-5 krotnie (każdy obszar osobno).
 7. Nałóż wcześniej wybraną ampułkę.

☐☐**Dobierając kosmetyki po zabiegu pamiętaj o tym, że skóra została perforowana, więc jest traktowana jako rana. Używaj np. żelu aloesowego, BetaSerum lub maski w płacie**☐☐

➔Ilość:

- 1x Kartridż 16 igieł